


# クローバー10専用折り畳み式スタンド取扱説明書

専用折り畳み式スタンド(以下専用スタンド)を使用すると、専用スタンドの下で筆記や作業が行いやすくなります。専用スタンドの使用方法は以下の通りです。専用スタンドは本体のスタンドを閉じて使用します。

※電源が入っているクローバー10本体を専用スタンドに取り付けると自動でライトが点灯し、鉛筆マークが2秒間表示します。(専用スタンドの角度によって消灯する場合があります) ライトの点灯消灯及び焦点固定ボタンの使い方については、本体の取扱説明書の、ライト及び焦点固定ボタンの項目をご参照ください。



## 専用スタンド使用時のご注意

専用スタンドの使用時は以下の点にご注意ください。

- 脱着時に本体の液晶モニターを持たないでください。液晶モニターに圧力がかかると液晶モニターが割れる可能性があります。フレームをやさしく持ってスタンドから本体を引き抜いてください。

- 脱着時に本体の操作レバーを持たないでください。操作レバーが破損する可能性があります。
- 両足が十分に開き、安定した状態でご使用ください。
- 本体を装着したまま充電する場合は、ケーブルに引っかかって、本体の破損やケーブルの断線の可能性がありますので、十分にご注意ください。
- 脚の開き具合が緩くなりましたら、ご家庭のプラスドライバーで脚の付け根部分のネジを締めてください。ネジを締めすぎるとネジの取り付け部分の破損や、脚の動きが硬くなりすぎる場合がありますので、脚の動きを確認しながらネジの締め具合を調整してください。

## お客様相談室

フリーダイヤル： 0120-886-610

受付時間： 平日 9:00～12:00

13:00～17:30（土曜・日曜・祝日は休み）

製造元： Sightcare Technology CO., LTD

輸入販売元： 株式会社 システムギアビジョン

〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL: 0797-74-2206 FAX: 0797-73-8894

URL: <http://www.sgv.co.jp>

E-Mail: [sgv-info@systemgear.com](mailto:sgv-info@systemgear.com)