

クローバーブック・メイト 使用準備

写真○部のテーブルを押さえながら矢印の方向へ引き上げてください。

1.



遮光カバー



遮光カバーを取付けている時は、カバーの端を少し持ち上げて引き上げてください。

2.



次にテーブルを押さえながらモニターを手前に引いて出してください。

3.



4.

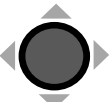
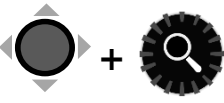
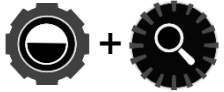


各部の名称

取扱説明書の各部の名称の番号に合わせています。



主な機能と操作方法

ボタン	機能	操作
8 	電源を入れる・切る	電源ボタンを約 3 秒間長押しする
	バッテリーの残量確認	電源ボタンを押す
	待機モードから復帰	
5 	拡大する	拡大/縮小ボタンを時計回りに回す
	縮小する	拡大/縮小ボタンを反時計回りに回す
	位置表示	拡大/縮小ボタンを短く押す
3 	カラーモードを変更する	モードボタンを回す
	フルカラーモードに戻る	モードボタンを押す
20 	静止画/動画 切替	静止画シャッターボタンを押す
	画像の保存	静止画シャッターボタンを長押しする
4 	拡大した画像をスクロール	見たい方向に操作レバーを押す
	スクロール速度を変更	操作レバーを任意の方向に押し、拡大/縮小ボタンを回す
6 	読み上げ	音声読み上げ/確定ボタンを短く 2 回押す
	読み上げ中の一時停止/再生	音声読み上げ/確定ボタンを短く押す
15 	ライン、マスク表示	ライン/マスクボタンを押す
	コントラスト調整	モードボタンを押しながら拡大/縮小ボタンを回す
14 	保存画像/ファイルを開く ・読書モードへの切替	切り替えボタンを短く押す
	読み上げ中：テキストモード/PDF モードの切替	
	A4 サイズの撮影	切り替えボタンを長押しする
2 	保存画像・ファイルを開く	メニュー/戻るボタンを長押しすると選択できます
	A4 サイズの撮影	メニュー/戻るボタンをを短く押し選択
	明るさ調整	
	ライトオン・オフ	
19 	フォーカス固定/解除する	焦点固定ボタンを短く押す
	強制フォーカス	焦点固定ボタンを長押しする

