

①各部の名称

※スイング式カメラアームが本体右方向に引き起こせます



- ①電源ボタン
- ②イヤホンジャック
- ③USB-C端子
- ④スタンドの脚
- ⑤スタンド
- ⑥スイング式カメラアーム
- ⑦A4サイズ撮影用カメラ

コンパクト10スピーチ クイックスタートガイド


※詳細な使い方は取扱説明書をご確認ください。

スタンドの開き方


画面が上向きで、Optelecのロゴが読める方向になるように設置し、本体を両手で持ちます。本体を手のひらで支えながら、スタンドを背面から引き出します。折り畳み式のスタンドの脚が完全にまっすぐになるまで引っ張り出します。

スタンドの閉じ方

画面が正面にくるようにします。本体の側面を両手の手のひらで支え、スタンドの脚の中央付近に指を置きます。スタンドの脚を軽く本体側に押し、本体と平坦になるまでスタンドを押し戻します。

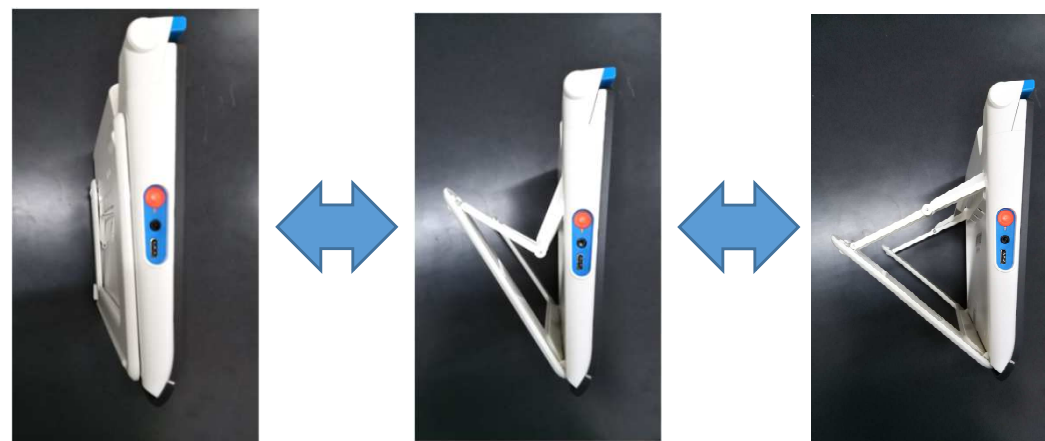

②電源のオンとオフ

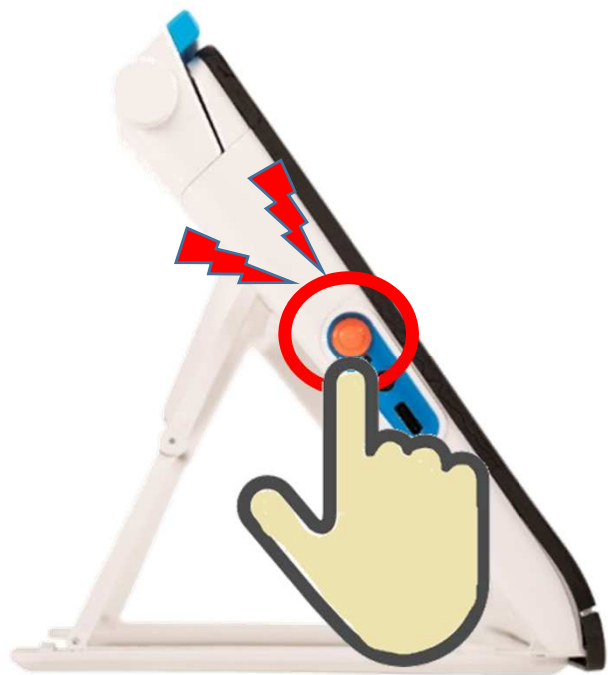


電源ボタンは本体の左側面にある丸いボタンです。

電源を入れるには、ボタンを長押しすると本体が短く振動し、電源が入ります。

電源を切るには、連続した電子音が流れるまでボタンを長押しすると、電子音の後で電源が切れます。

③A4サイズ撮影用カメラ

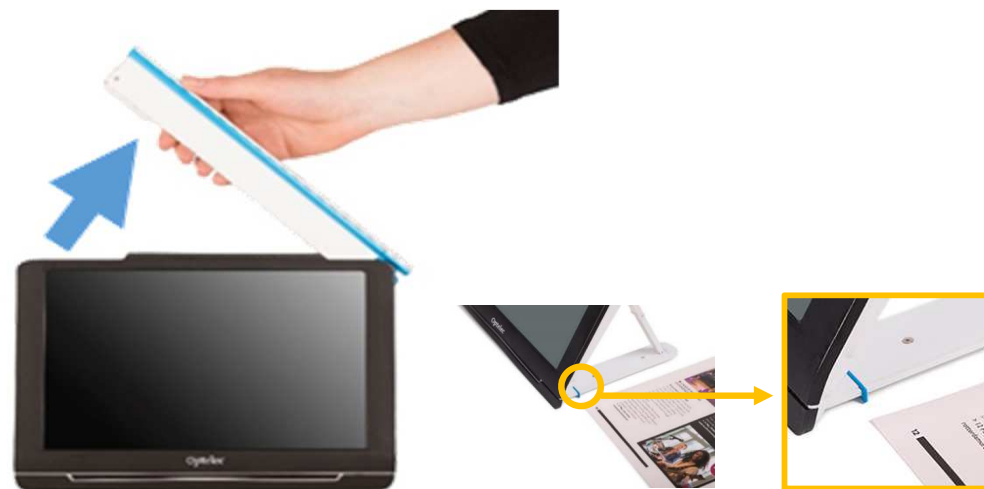


A4サイズ撮影用カメラは、アームを本体右側に開いた状態で使用します。

A4サイズ撮影用カメラを使用すると、より広い空間で、写真や対象物をより快適に閲覧したり、筆記等の作業をしたりすることができます。

A4サイズ撮影用カメラで原稿を映す際は、原稿の左下端を、スタンド右側面の青い線に合わせてください。


本体のスタンドを閉じた状態では、遠方モードカメラが優先されるため、A4サイズ撮影用カメラは使用できません。

④基本操作

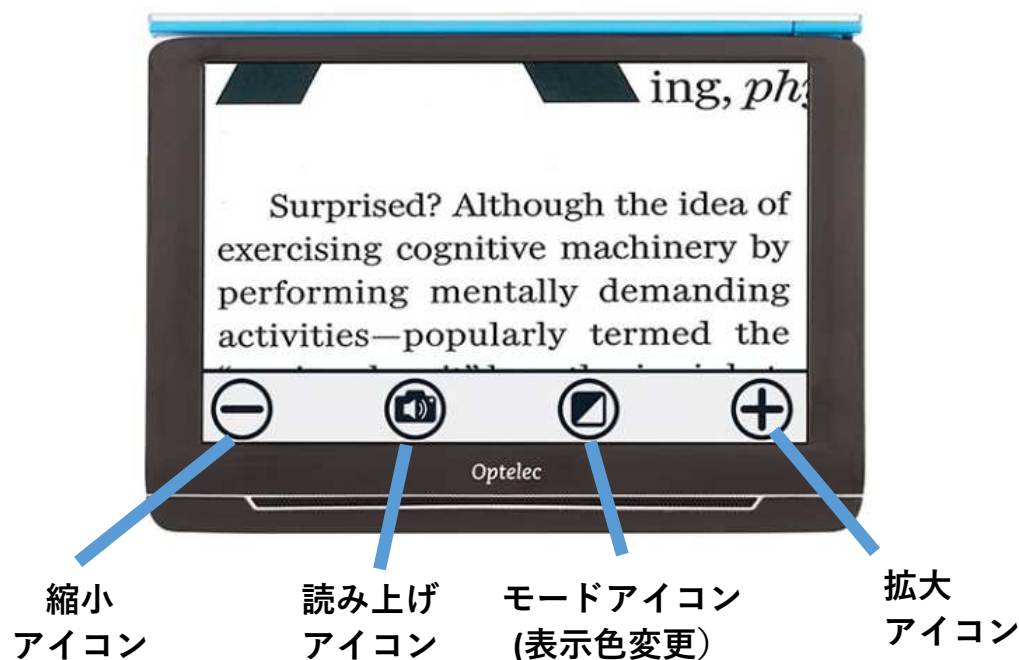


本機はタッチパネルで操作します。

画面上に表示されるアイコンをタッチすることで画像の拡大や表示色の変更が可能です。

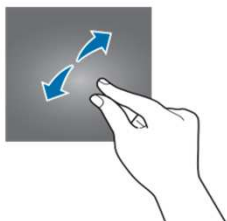


ピンチアウト

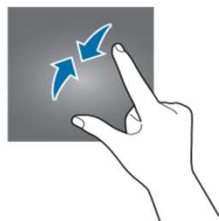

ピンチイン

また、画面をタッチしたまま指を動かす、ピンチン・ピンチアウトでの倍率変更も可能です。

⑤簡単モード/標準モード

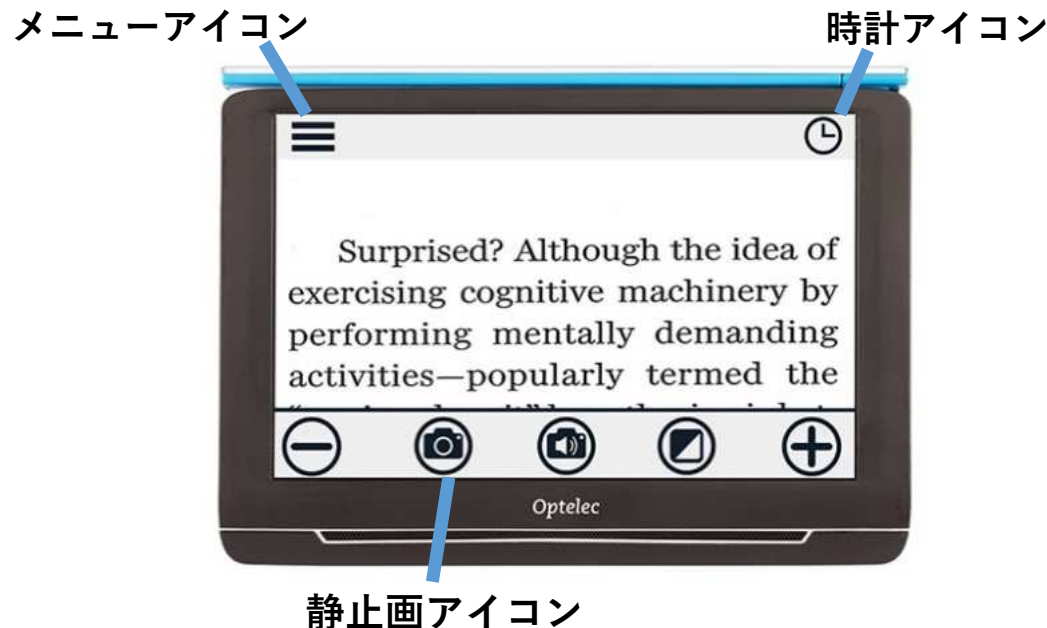

本機はシンプルな「簡単モード」とすべての機能を使用できる「標準モード」があります。

「標準モード」では「簡単モード」に上記の3つのアイコンが追加されます。

「簡単モード」のアイコンは前項を確認ください。

モード切替は任意の画面で「モードアイコン」を長押しして選択します。


⑥読み上げ機能



読み上げアイコンをタッチすることでカメラの撮影範囲に入っている文字を音声で読み上げます。

読み上げ画面では「再生/一時停止アイコン」で音声の再生/一時停止を行います。「オーディオアイコン」をタッチすると「音量アイコン」と「速度アイコン」が表示され、それぞれを左右にスライドして音量/読み上げ速度を調整します。

⑦静止画撮影(標準モード時のみ)

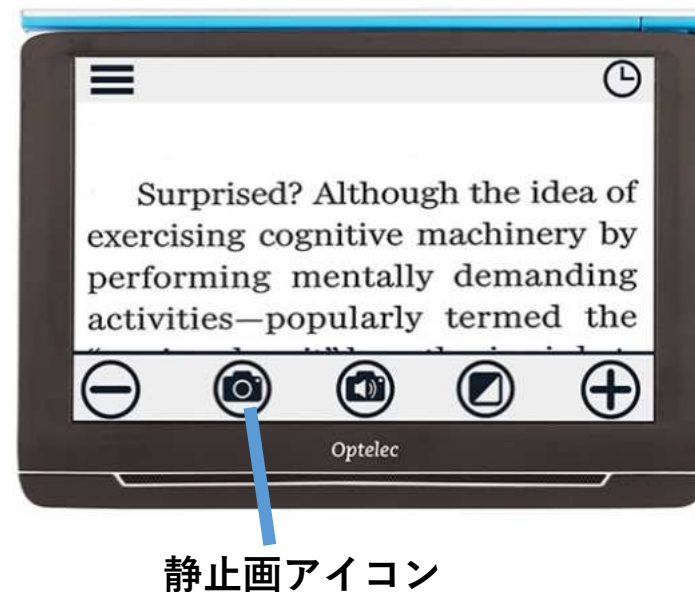

「静止画アイコン」をタップすることで画面を一時停止することができます。

一時停止した画面内では拡大・表示色の変更に加え、画面内のスクロールができます。

スイング式カメラアームでA4サイズを撮影すると、本体も原稿も動かさずに、画面をスクロールしてA4サイズを丸ごと読み進むことができます。