

# 音声色彩判別装置 カラーリーノ 取扱説明書

この度は音声色彩判別装置カラーリーノをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただくか、取扱説明 CD をご確認くださいませよう願います。

## 1. 概観：

本体は細長い台形です。本体は縦長に持って使用します。面が狭く、少し丸みを帯びている方が手前。面が広く、平らになっている方が体と反対側になります。また、平でボタンがある面が表面です。

## 2. 表面：

表面には、先端に近いほうから、スピーカーとボタンが二つ付いています。また、スピーカーからさらに先端側に小さな盛り上がった点があります。これは、この点の先の本体表面にセンサーがあることを意味します。この点を前方（身体から離れる向き）に向けてください。スピーカーから数センチ手前のところに2つのまるいボタンがあります。これらのボタンには以下の機能があります。

スピーカーに近いボタン：色彩判別ボタン

スピーカーから遠いボタン：光源検知ボタン

前面：中央にセンサーがあります。

右側面：スピーカーのわき付近に2つの差し込みジャックが並んでいます。前方寄りのジャックは、3.5ミリジャックのステレオタイプのイヤホン（付属品ではありません）用です。もうひとつの小さいジャックは弊社のサービス技術者が修理時に使用するインターフェースです。

## 3. 裏面：

裏面前方の2つの角にはそれぞれのネジ穴があります。その手前にシリアルナンバーが表記されたステッカーが貼られています。さらにその手前、カラーリーノ裏面後方部にはバッテリーボックスがあります。

## 4. 電池の入れ方：

カラーリーノの裏面後方部にあるバッテリーボックスのカバーを爪で前方へ押して外してください。カバーは完全に取り外せます。単4形乾電池（2本）をマイナス極がスプリングに当たる向きにしてそれぞれ入れてください。バッテリーボックスのカバーを再び閉じてください。以上でカラーリーノは使用できる状態になります。

何も操作が加えられずに約30秒間経過すると、節電のために自動的に電源が切れるようになっています。2つのボタンのどちらかを押すと再び電源が入ります。

色彩判定：

カラリーノのセンサーを、色を判別したい物の表面に垂直に当ててください。色彩判別ボタン（スピーカーに近い方のボタン）を短く押すと判定された色がアナウンスされます。色彩判別ボタンを押し続けるとその間アナウンスが繰り返されます。センサーが対象物の表面に垂直に当たっていない場合、判定不能を告げる、ブーという電子音が流れます。色彩は明るい、暗いなどの修飾語を含め、150通り判別します。

光源検知、光度測定機能：

光源検知ボタン（スピーカーから遠い方のボタン）を押すと、ピーと言う電子音が鳴ります。この電子音の高さで明るさを表現します。ボタンを押しながら、カラリーノを室内で回転させて様々な方向へ向けると光源の位置や、部屋の電気が点いているかどうかなどが判別できます。

- ・ 電子音が高いほど光源が強いあるいは近くにある、もしくは明るいことを意味します。
- ・ 電子音が低いほど光源は弱いか遠くにある、もしくは暗いことを意味します。

音量の調整：

3段階で音量を調整することができます。光源検知ボタンを押した状態で、色彩判別ボタンを短く押してください。

押すたびに音量が小一中一大と変化しますので、お好みの大きさに調整して下さい。

仕様：

色彩判別機能：	150以上の色彩ニュアンスを識別
光度測定機能：	10,000段階の異なるトーンを識別
アナウンス機能：	20以上の異なる言語による高性能のアナウンス
音量調整：	3段階の音量 ステレオタイプのイヤホン（3.5ミリジャック） 接続可能
本体寸法と質量：	W（39-50）xH（110）xD（21-25） mm／70g
電源：	単4乾電池x2本
保証期間：	1年間

製造元：有限会社 ケアテック

（オーストリア／ウィーン）

CARETEC GmbH

輸入・発売元：株式会社タイムズコーポレーション

〒665-0051

兵庫県宝塚市高司 1-6-11

TEL：0797-74-2206

FAX：0797-73-8894

お客様相談窓口：0120-886610