

i-loview

アイ・ラビュー 430B

取扱説明書



株式会社タイムズコーポレーション

はじめに

この度は拡大読書器 アイ・ラビューをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用いただく前に、必ず取扱説明書をお読みください。

目次

(ページ)

はじめに	1
安全上のご注意	2
使用上のご注意	8
1. セット内容	10
2. 本体	11
3. 操作方法	16
基本編	16
応用編	18
4. 仕様	26
5. 保証期間、修理サービス	27
6. お問い合わせ先	28

安全上のご注意

安全にお使いいただくために…

必ずお守り下さい

この「取扱説明書」の表示では、本装置を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。次の表示と図記号の意味をよくご理解いただき、それから本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

	名称：注意 意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：禁止 意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な禁止内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：風呂場・シャワー室での使用禁止 意味：装置を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：接触禁止 意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：分解禁止 意味：装置を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：強制 意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：電源プラグをコンセントから抜け 意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が書かれています。



警告



万一、装置から煙がでていたり、異臭や異音がするなど、異常状態の場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認したのち、ただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置の内部に水、金属類などの異物が入ってしまった場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せずただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置を落としたり、カバーなどを破損した場合には、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せず、ただちに販売店に連絡して下さい。



警告



装置から液体が漏れ出している場合は、装置に触れない。失明や火傷などの事故の原因となります。特に、液体が目に入ってしまった場合は多量の水道水でただちに患部を洗浄し、至急医師の診断を受けて下さい。

また、液体に触れた場合や液体が染みた衣服などに触れた場合でも水道水でただちに洗浄し、医師の診断を受けて下さい。なお、これに併せてただちに販売店に連絡して下さい。



引火性のガスや発火性の物質がある場所では使用しない。火災、爆発の原因となります。



装置のカバー、キャビネットを外さない。感電の原因となります。

内部の点検、整備や修理は販売店にご依頼下さい。



装置を分解、改造しない。火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧で使用する。火災や感電の原因となります。



警告



風呂場、雨や雪が降っている屋外、その他水がかかる場所、湿気の多い場所では使用しない。感電の原因となります。



露の付いた状態で使用しない。感電の原因となります。



ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルを装置の下敷きにしない。ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となります。



ケーブルが痛んだら（芯線の露出、断線など）、すぐに使用を止め、販売店に交換を依頼する。火災や感電の原因になります。



ケーブルを無理に引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたりしない。火災や感電の原因になります。



雷が鳴り出したら、装置や接続されたケーブルなどに触れない。感電の原因となります。



注意



必ず付属のACアダプタを使用する。他のACアダプタを使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う。感電の原因となる場合があります。



装置を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。火災の原因となる場合があります。



ケーブルを着脱するときは、プラグ部分を持って行う。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となる場合があります。



ほこりの多い場所で使用しない。火災や感電の原因となる場合があります。
電源プラグや接続部にほこりが付着している場合は取り除いて使用して下さい。



注意



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプタ、電源プラグやケーブルを抜き差ししない。感電の原因となる場合があります。

使用上のご注意

安全にお使いいただくために、以下の内容は必ずお守りください。

- 充電には必ず付属のACアダプタをご使用ください。他のACアダプタを使って充電しますと、電池の破裂、本体に回復できないダメージをあたえる場合があります、修理の場合は保証の対象外となります。


- ・ 1 カ月間以上お使いにならない場合は、一旦バッテリーをフル充電して、電源スイッチをオフの状態にして保管してください。
- ・ 湿度の高い場所、火気の近く、ホコリの多い場所などでのご使用は避けてください。また、衝撃を与えたり、水に濡らさないでください。
- ・ 使用可能温度：0°C～35°C
- ・ 本体を分解しないで下さい。分解された場合には、保証の対象外となります。
- ・ 廃棄する場合は、ご使用の地域（都道府県又は市町村）にて定められているリサイクル法及び事業所にて定められている産業廃棄物処理法に従った処理を行ってください。

1. セット内容

本商品には、製品本体及び付属品が入っています。これらすべてが揃っているかどうか確認してください。

- 本体
- 本体用ケース
- ストラップ（装着）
- 取扱説明書（本書）
- ACアダプター
- クロス
- 映像ケーブル
- 保証関係書類

2. 本体

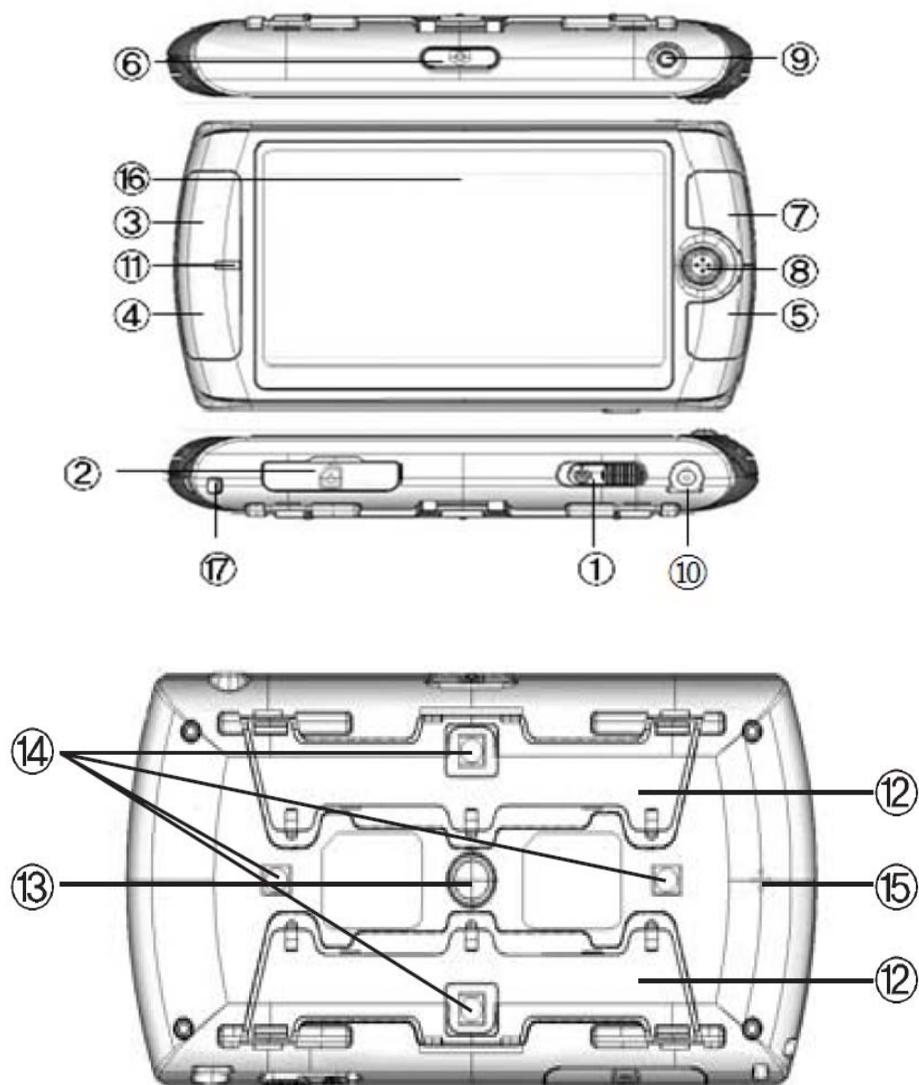

① 電源スイッチ

スイッチを右にずらすと電源が入ります。
もう一度右にずらすと電源が切れます。

② SDカードスロット

撮影した画像をSDカードに保存できます。
32GBのカードまで対応できます。

③ ズームボタン (+) 倍率を上げます。

④ ズームボタン (-) 倍率を下げます。

倍率は1 2段階で調節できます。

Zoom Level	被写体からの距離	
	スタンド使用	55 mm
Level 1	3.5 x	1.5 x
Level 2	3.8 x	1.7 x
Level 3	4.6 x	2.0 x
Level 4	5.4 x	2.4 x
Level 5	6.5 x	2.8 x
Level 6	7.3 x	3.2 x
Level 7	8.2 x	3.6 x
Level 8	9.6 x	4.0 x
Level 9	11.2 x	4.7 x
Level 10	12.6 x	5.5 x
Level 11	14.0 x	6.1 x
Level 12	17.0 x	6.9 x

⑤ モード切替ボタン

白黒反転、白黒、黄青、青黄、黒黄、カラーの6種類のなかからお好みのモードに切替できます。

⑥ シャッターボタン

ズームボタンで拡大した時に見ている画像の静止・撮影ができます。

⑦ 明るさ調節ボタン

画面の明るさを5段階調節ができます。

⑧ ジョグボタン

見ている画像、および撮影画像を拡大した時に上下・左右にスクロールさせることができます。またメニュー画面のときにメニュー項目の選択・決定をすることができます。

⑨ 映像出力端子

付属の映像ケーブルを使用してテレビモニターに映像を表示させることができます。

⑩ 充電ジャック

充電する際にA Cアダプターのプラグを差し込みます。

⑪ 充電ランプ

充電している時にオレンジ色に点灯します。充電が完了すると緑色に変わります。

⑫ 折りたたみ式スタンド

使用する際はスタンドを両方起こしてください。

⑬ カメラ部

映像を撮影するCMOSカメラです。
レンズが汚れた場合は付属のクロスで拭いてください。

⑭ LED照明

明るさ調節ボタンを長押しすると消灯します。もう一度長押しすると点灯します。

⑮ スピーカー

ビーブ音が鳴ります。メニュー画面でビーブ音の音量調節ができます。

⑩画面

映像が映る4.3インチワイド、有機EL
(OLED)画面です。

⑪ストラップホルダー

付属のストラップを取り付けます。
(取り付けた状態で出荷します)

3. 操作方法

基本編

充電について

電源OFFの状態、付属のACアダプターのプラグを充電ジャックに差し込みます。充電ランプがオレンジ色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると点灯が緑に変わります。

画像表示方法について

折りたたみ式スタンドを起こし、本体下の側面の電源スイッチを右方向にずらして電源を入れます。（スタンドは両方起こしてください）背面のLEDライトが点灯し、被写体の上に本体を載せると画面に映像が映ります。

モード切替について

モード切替ボタンを押して、白黒反転、白黒、黄青、青黄、黒黄、カラーのなかからお好みのモードに切替ます。

倍率調節について

ズームボタン（+）または（-）を押して見やすい倍率に調節します。倍率は1 2段階に調節できます。

明るさ調節について

明るさ調節ボタンを押すと、明るさが5段階に調節できます。お好みの明るさに調節します。

シャッター機能について

シャッターボタンを押すと画像を撮影することができます。対象物から 5.5cm まで離して撮影することができます。撮影画像は拡大、モード切替することができます。もう一度押すと通常モードに戻ります。シャッターボタンを2秒以上長押しして撮影すると、画像がSDカードに保存されます。（画面に2秒間カメラマークが表示されます）

応用編

スクロール読みについて

見ている画像、およびシャッターボタンで撮影した画像を拡大し、ジョグボタンを上下、左右に動かしてスクロール読みをすることができます。（撮影した範囲をスクロールするため、拡大しない場合はできません）

ビーブ音について

ズームボタン（+）と明るさ調節ボタンを同時に2秒以上長押しするとビーブ音が設定されます。ボタン操作するたびにビーブ音が鳴ります。解除するには再びズームボタン、明るさ調節ボタンを同時に2秒以上長押しすると解除されません。

電池残量表示について

電池残量表示は残量が30%以下になると表示されます。また、モード切替ボタンとズームボタン（+）を同時に2秒以上長押しすると電池マークの残量表示が画面の右上に出てきます。再びモード切替ボタン、ズームボタンを同時に2秒以上長押しすると表示が解除されます。

A Cアダプターを使用しているときには電池マークのなかにコンセントの絵が入った表示が画面の右上に出てきます。

マジックモードについて

モード切替ボタンを2秒以上長押しすると「マジックモード」に切替ります。

コントラストのレベルが変わり、文字が鮮明になります。筆記をする際に有効なモードです。

再びモード切替ボタンを2秒以上長押しすると通常のモードに戻ります。

また、マジックモードは2分間経過すると、自動的に通常のモードに戻ります。

テレビへの接続について

付属の映像ケーブルを本機の映像出力端子とテレビモニターのアナログ映像入力端子に接続すると、本機の映像をテレビ画面に表示させることができます。倍率はテレビ画面の大きさに比例して大きくなります。

※接続中は本機に映像が映りません

省電力モードについて

電源を入れた状態で3分間、本機のボタンを操作しない、あるいは本機を動かさないでいると省電力モードになり、映像が消えます。操作ボタンを押すと再び映像が映ります。

さらに3分間経過すると自動的に電源が消えます。（ビープ音を設定している時はビープ音が一回鳴ります）

LED照明のON・OFFについて

明るさ調節ボタンを2秒以上長押しするとLED照明が消えます。本機のLED照明が対象物に反射して見にくい場合は、照明を消して見てください。再び明るさ調節ボタンを2秒以上長押しすると点灯します。

工場出荷時設定（リセット）について

ズームボタン（+）を押しながら電源を切ってください。再び電源を入れると画面に


「Factory Reset」の文字が約2秒間表示され、工場初期設定に戻ります。動作不良などの時

以外は設定が変わるので、この操作は行わないでください。

メニュー画面について

明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しするとメニュー画面が表示されます。（6つのアイコン）

通常の画面に戻るには明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しします。

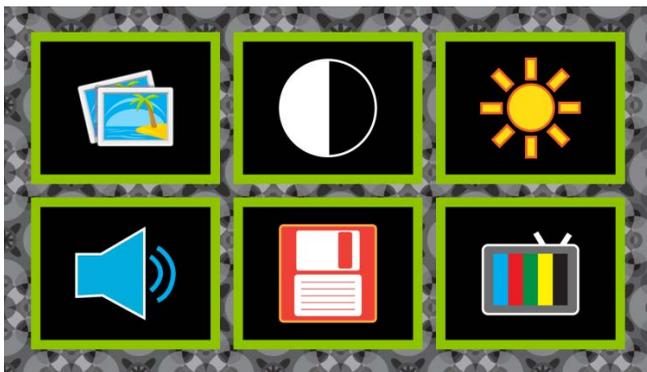

1. 画像アイコン



画像アイコンをジョグボタンを使って選択すると、SDカードに保存されている画像を表示することができます。

ジョグボタンを左右に動かして見たい画像を選択します。画像を拡大、モード切替、スクロールすることができます。

画像が不要な場合、画像を表示させてジョグボタンを押すとゴミ箱マークが現れます。



YES

NO

ジョグボタンで YES を選択すると画像が削除されます。NO を選択するとマークが消えます。

明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しするとメニュー画面が表示され、もう一度長押しすると通常モードに戻ります。

2. コントラストアイコン



コントラストアイコンをジョグボタンで選択し、左右に動かしてコントラストのレベルの変更が可能です。16段階の中から好みのコントラストの選択できます。ジョグボタンもしくは明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しするとメニュー画面に戻ります。

3. 照明アイコン



LED照明の明るさ調節が可能です。ジョグボタンで照明アイコンを選択し、左右に動かしてレベル3、レベル2、レベル1、消灯と4段階から変更が可能です。ジョグボタンもしくは明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しするとメニュー画面に戻ります。

4. 音量アイコン



ビーブ音の大きさの調節ができます。ジョグボタンで音量アイコン選択し、左右に動かして16段階の中から好みの音量に変更が可能です。ジョグボタンもしくは明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しするとメニュー画面に戻ります。

5. フロッピーアイコン



フロッピーアイコンをジョグボタンで選択すると、倍率、モード、明るさ、コントラストなど、自分が使いやすいように設定した状態が保存されます。画面に「User Config Saved」と約2秒間表示されます。

- 保存した内容に戻すにはズームボタン（一）を2秒以上長押しします。

6. テレビモニターアイコン



外部出力端子から海外のPAL方式のテレビモニターに映像を出力する際に、映像方式の切替ができます。（出荷時はNTSC方式）

ジョグボタンでテレビモニターアイコンを選択し、PAL方式を選びます。

注)NTSC方式:日本、アメリカ、韓国など

PAL方式:ヨーロッパ、東南アジア、中国など

ジョグボタンもしくは明るさ調節ボタンとモード切替ボタン同時に3秒以上長押しするとメニュー画面に戻ります。

4. 仕様

画面	4.3インチワイド有機ELディスプレイ (OLED 16:9)
倍率	最低1.5倍 (被写体から5.5cm離した時) 最大17倍 (スタンド使用/被写体から2.5cm離した時)
カメラ	CMOS カラー
明るさ調整	16段階
画像保存	SDカード (2G付属) 32Gまで使用可能
カラーモード	白黒反転、白黒、黄青、青黄、黒黄、カラーの6種類
バッテリー内蔵	リチウムポリマーバッテリー 4.5時間充電 4~5時間連続使用
サイズ	幅14.6cm×高さ8.3cm×厚さ2.2cm
インターフェイス	映像出力端子 (アナログ) SDカードスロット
重さ	220g
インターフェイス	映像出力端子 (アナログ) SDカードスロット

※ 仕様は予告なしに変更されることがあります

5.保証期間、修理サービス

製品保証期間：購入日より1年間

（ただしユーザ登録された場合は2年間になります）

1. 内蔵のバッテリーは消耗品です。保証の対象ではありません。バッテリーの交換は、お求めになった販売店にご連絡ください。
2. 保証期間中での画面の不良画素について、10個以下については保証の対象ではありません。
3. 修理を依頼される前に、「使用上のご注意」をはじめ、取扱説明書の内容をご覧頂き、なお異常のあるときは、必ず装置の電源を切ってから、お求めになった販売店にご連絡ください。アフターサービスについてご不明な点はお求めになった販売店にお問い合わせください。
4. 製品保証内容は、商品に同梱されている品質保証書に基づきます。

6. お問い合わせ先

本商品やサービスについてご不明な点がございましたら、下記サービス窓口までご連絡願います。

株式会社 タイムズコーポレーション
お客様相談センター
フリーダイヤル:0120-886610
平日 9:00~17:30 (土日祝は休み)

製造元：C & P Co.,Ltd (韓国)



輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション
〒665-0051兵庫県宝塚市高司1-6-11
TEL:0797-74-2206
FAX:0797-73-8894

<http://www.times.ne.jp>

