

Q U I C K L O O K

クイックルック

取扱説明書



ご使用前にお読みください

はじめに

この度は、クイックルックをご購入頂き、誠にありがとうございます。クイックルックは、シンプルなデザイン、手軽にご使用頂けますが、必ず取扱説明書をお読み頂くようお願い致します。また、お読みいただいた後はいつでも見直せる場所に必ず保管して下さい。

目次

| | |
|------------------|----|
| はじめに | 1 |
| 安全上のご注意 | 2 |
| 使用上のご注意 | 9 |
| セット内容 | 10 |
| バッテリー充電方法 | 10 |
| 操作方法 | 12 |
| 初期設定への戻し方 | 15 |
| リセットの仕方 | 15 |
| ストラップ取付方法 | 15 |
| お手入れ方法 | 16 |
| 仕様 | 16 |
| 保証の内容、修理サービスについて | 17 |

安全上のご注意

安全にお使いいただくために…

必ずお守り下さい

この「取扱説明書」の表示では、本装置を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。次の表示と図記号の意味をよくご理解いただいてから本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

| | |
|---|--|
|  | 名称：注意 意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。 |
|  | 名称：禁止 意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な禁止内容は近くに文章や絵で示します。 |
|  | 名称：風呂場・シャワー室での使用禁止 意味：装置を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。 |
|  | 名称：接触禁止 意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。 |
|  | 名称：分解禁止 意味：装置を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。 |
|  | 名称：強制 意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な内容は近くに文章や絵で示します。 |
|  | 名称：電源プラグをコンセントから抜け 意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が書かれています。 |



警告



万一、装置から煙がでていたり、異臭や異音がするなど、異常状態の場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認したのち、ただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置の内部に水、金属類などの異物が入ってしまった場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せずただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置を落としたり、カバーなどを破損した場合には、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せず、ただちに販売店に連絡して下さい。



警告



装置から液体が漏れ出している場合は、装置に触れない。失明や火傷などの事故の原因となります。特に、液体が目に入ってしまった場合は多量の水道水でただちに患部を洗浄し、至急医師の診断を受けて下さい。

また、液体に触れた場合や液体が染みた衣服などに触れた場合でも水道水でただちに洗浄し、医師の診断を受けて下さい。なお、これに併せてただちに販売店に連絡して下さい。



引火性のガスや発火性の物質がある場所では使用しない。火災、爆発の原因となります。



装置のカバー、キャビネットを外さない。感電の原因となります。

内部の点検、整備や修理は販売店にご依頼下さい。



装置を分解、改造しない。火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧で使用する。火災や感電の原因となります。



警告



風呂場、雨や雪が降っている屋外、その他水がかかるところ、湿気の多いところでは使用しない。感電の原因となります。



露の付いた状態で使用しない。感電の原因となります。



ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルを装置の下敷きにしない。ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となります。



ケーブルが痛んだら（芯線の露出、断線など）、すぐに使用を止め、販売店に交換を依頼する。火災や感電の原因になります。



ケーブルを無理に引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたりしない。火災や感電の原因になります。



雷が鳴り出したら、装置や接続されたケーブルなどに触れない。感電の原因となります。



注意



必ず付属のACアダプタを使用する。他のACアダプタを使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う。感電の原因となる場合があります。



装置を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。火災の原因となる場合があります。



ケーブルを着脱するときは、プラグ部分を持って行う。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となる場合があります。



ほこりの多い場所で使用しない。火災や感電の原因となる場合があります。
電源プラグや接続部にほこりが付着している場合は取り除いて使用して下さい。



注意



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプタ、電源プラグやケーブルを抜き差ししない。感電の原因となる場合があります。

使用上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください：

- 充電には所定のACアダプタをご使用ください。他のACアダプタを使って充電しますと、クイックルックに回復できないダメージをあたえ、また保証が無効となることがあります。
- 1カ月間以上お使いにならない場合は、一旦バッテリーをフル充電して、電源スイッチをオフの状態にして保管してください。
- 湿度の高い場所、浴室、ホコリの多い場所などでのご使用はお避け下さい。
- 分解しないで下さい。分解された場合には、保証対象外となります。
- 廃棄する場合は、ご使用の地域（都道府県又は市町村）にて定められているリサイクル法及び事業所にて定められている産業廃棄物処理法に従った処理を行って下さい。

セット内容


本商品には、製品本体及び付属品が入っています。これらすべてが揃っているかどうか確認してください。

- 本体（ディスプレイ、カメラ、バッテリー）
- 専用保護ケース
- ストラップ
- ACアダプタ及び電源ケーブル
- 取扱説明書（本書）
- 保証書


バッテリー充電方法

充電目安時間は、約3時間です。

図のように、付属のACアダプタと電源コードを接続し、電源コンセントに接続します。

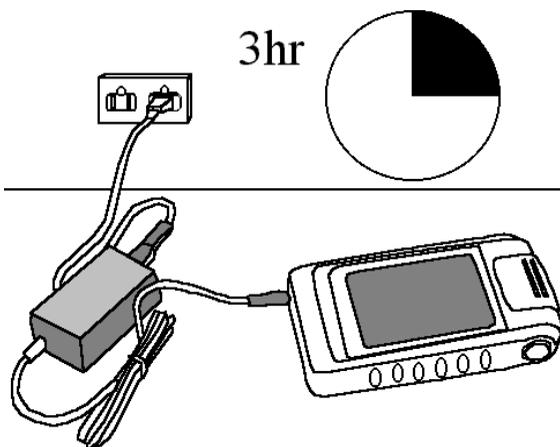

充電中は、電源入力端子の隣にあるランプが赤く点灯します。充電が完了しますと、ランプが消灯します。ランプ消灯後、充電をしたままでも、装置への影響はありません。

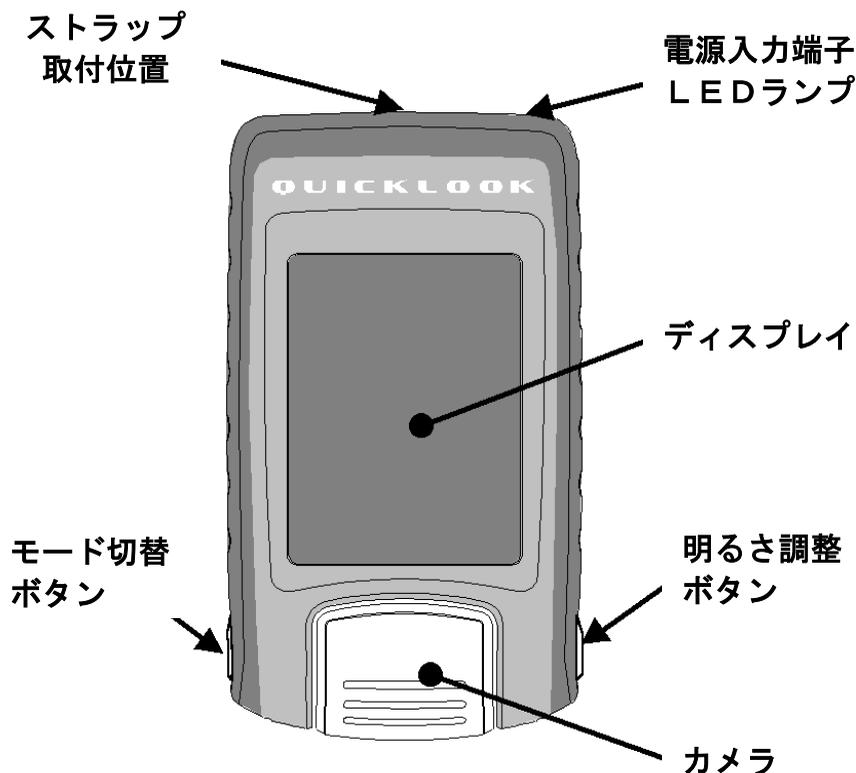


操作方法

カメラを回転させることにより、電源が入ります。
また、元に戻すことにより、電源が切れます。

読む時：

カメラを 90 度
に回転させ、拡
大したい部分の上
へ直接かざします。
ディスプレイの真
下にあるものを拡
大するものではあ
りませんので、こ
の点で拡大鏡とは
異なります。

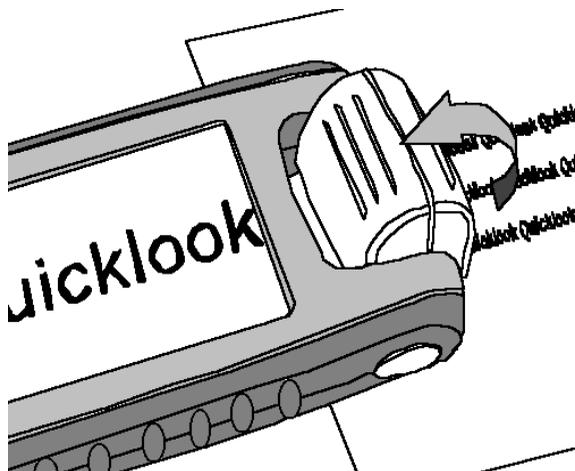

クイックルックは、どの角度から見られますが、
ディスプレイの真上から見るとカラーモードは、最
も美しく表示されます。

モード切替方法

本体の側面にあるモード切替ボタン（11ページ
参照）を押すと、カラー、白黒、白黒反転と順番に
切替わります。


拡大する物によりどのモードが一番見やすいかモー
ド切替をして、ご確認ください。すべての物を、白
黒、白黒反転表示させることが可能です。

明るさ調整

明るさを4段階調整することが可能です。明るさ調整ボタン（11ページ参照）を押すだけで調整できます。モード切替をした場合は、再度明るさ調整ボタンで調整して下さい。電源を切り、再度電源を入れた場合は、切る前の明るさ調整が維持されています。

筆記する時：

クイックルックを使って筆記する場合、カメラを最後まで回転させてください。ディスプレイを見て、書き込む位置にペン先を合わせて下さい。内容を確認しながら筆記できます。

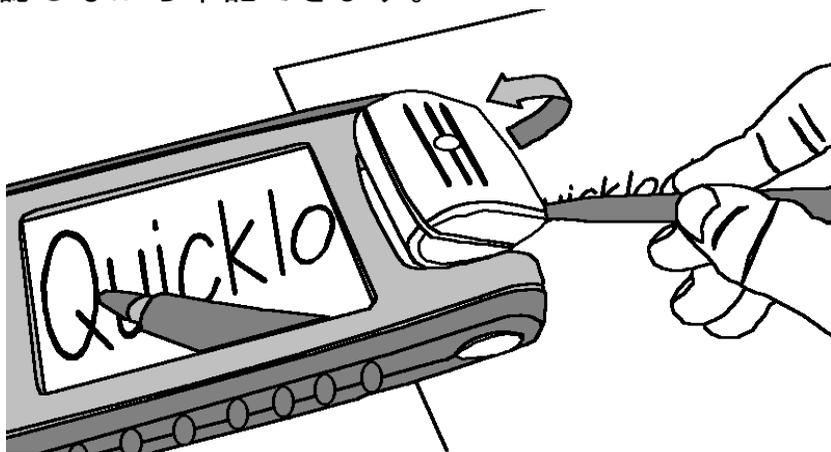

初めのうちは、思った通りのサイズでの筆記が困難ですが、何度も筆記しているうちに感覚がつかめてきます。

サイレントモード

ボタン操作時の音を消す場合、モードボタンを押しながら、カメラを回転させ電源を入れてください。その際に音が鳴らなければ、サイレントモードになります。解除しない限り電源を切ってもこの設定は記憶されます。

また、音を鳴らすように設定する場合、モードボタンを押しながら、電源を入れてください。音が鳴る設定に戻ります。

自動電源オフ機能

電源を切り忘れても、3分間何も操作をしない場合、電源が自動的に切れる機能です。明るさ調整ボタンを押しながら電源を入れると、自動電源オフ機能が作動します。最後の操作が行われてから3分後に自動的に電源が切れます。電源が切れる前には10秒間音が鳴ります（サイレントモードの場合は鳴りません）。その間に、モードボタンと明るさ調整ボタンを同時に押すと、電源が切れるのを解除できます。

自動電源オフ機能を解除するには、明るさ調整ボタンを押しながら電源を入れてください。自動電源オフ機能は解除され、手動でのみしか電源を切ることはできません。

初期設定への戻し方

モードボタンと明るさ調整ボタンを同時に押しながら、電源を入れて下さい。3回音が鳴りますと、初期設定へ戻った状態です。

- カラーモード
- 明るさ調整初期設定
- ボタン確認音オン
- 自動電源オフ機能解除

リセットの仕方

ボタン操作がきかない、電源が切れない状態の場合は、リセット作業を行ってください。ペンや、先の細いものを使用して、本体を裏返し、カメラの近くにあるくぼみを押してください。

ストラップ取付方法

ストラップの先端の細い部分を、本体のストラップ取付位置（11ページ参照）へ通し、通した輪の中へストラップの太い部分を通し、きっちりと締めてください。

お手入れ方法

クイックルックが汚れましたら、合成洗剤を薄く溶かした水で雑巾を湿らせ硬くしぼってから拭取ってください。ディスプレイに影響がありますので、化学薬品、研磨剤などは使用しないでください。水に濡らすことは、厳禁です。

ディスプレイの指紋の汚れなどには、ディスプレイ専用のクリーンキットをご使用されますと、よりきれいに取れます。

仕様

| | |
|----------------|---|
| 寸 法 | 168mm x 96mm x 28mm |
| 重 量 | 300g |
| 消費電力 電 源 | 使用時 15W , 充電中の使用時 35W 電圧 100-240V AC 50/60Hz 5V dc センタープラス 2.5A |
| バッテリー | カスタムシングルセルリチウムイオン |
| ディスプレイ | 4 型 TFT ディスプレイ |
| 倍 率 | 2 倍から 5.5 倍 |
| 保管時温度 使用時温度 | -10° C から +40° C +5° C から +35° C |

※仕様は、予告無しに変更することがあります。

保証の内容、修理サービスについて

1. 内蔵のバッテリーについては消耗品です。保証の対象ではありませんので、ご注意ください。バッテリーの交換は、お求めになった販売店にご連絡ください。
2. 保証期間中での液晶モニター画面の不良画素について、10個以下については保証の対象ではありません。
3. 保証期間中に修理を依頼されるときは、「使用上のご注意」をはじめ、取扱説明書の内容をもう一度ご覧頂き、なお異常のあるときは、必ず装置への電源供給を停止し、装置の電源を切ってから、お求めになった販売店にご連絡ください。アフターサービスについてご不明な点はお求めになった販売店にお問い合わせください。
4. ご連絡いただきたい内容は、ご住所、ご氏名、製品名、ご購入日、故障内容、異常の状況（できるだけ詳しく）などです。

製造元：Ash Technologies Limited



輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション
〒665-0051 兵庫県宝塚市高司1-6-11
TEL:0797-74-2206
FAX:0797-73-8894
<http://www.times.ne.jp>