

SENSE VIEW

# センスビュー P430

## 取扱説明書



ご使用前にお読みください

# はじめに

このたびは、センスビューをご購入いただき、まことにありがとうございます。センスビューは、シンプルなデザインで、手軽にご使用いただけますが、必ず取扱説明書をお読みいただくようお願い致します。また、お読みいただいた後はいつでも見直せる場所に必ず保管して下さい。

## 目次

はじめに	1
安全上のご注意	2
使用上のご注意	9
セット内容	10
バッテリー充電方法	10
操作方法	11
ビープ音について	15
節電モード	15
バッテリー表示	16
ストラップ取付方法	17
お手入れ方法	17
仕様	18
保証の内容、修理サービスについて	19
お問い合わせについて	20

# 安全上のご注意

安全にお使いいただくために…

必ずお守り下さい

この「取扱説明書」の表示では、本装置を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。次の表示と図記号の意味をよくご理解いただき、てから本文をお読み下さい。



## 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 図記号の意味

	名称：注意 意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：禁止 意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な禁止内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：風呂場・シャワー室での使用禁止 意味：装置を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：接触禁止 意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：分解禁止 意味：装置を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が書かれています。
	名称：強制 意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：電源プラグをコンセントから抜け 意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が書かれています。



## 警告



万一、装置から煙がでていたり、異臭や異音がするなど、異常状態の場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認したのち、ただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置の内部に水、金属類などの異物が入ってしまった場合は、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せずただちに販売店に連絡して下さい。



万一、装置を落としたり、カバーなどを破損した場合には、すぐに装置の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。そのまま使用せず、ただちに販売店に連絡して下さい。



## 警告



装置から液体が漏れ出している場合は、装置に触れない。失明や火傷などの事故の原因となります。特に、液体が目に入ってしまった場合は多量の水道水でただちに患部を洗浄し、至急医師の診断を受けて下さい。

また、液体に触れた場合や液体が染みた衣服などに触れた場合でも水道水でただちに洗浄し、医師の診断を受けて下さい。なお、これに併せてただちに販売店に連絡して下さい。



引火性のガスや発火性の物質がある場所では使用しない。火災、爆発の原因となります。



装置のカバー、キャビネットを外さない。感電の原因となります。

内部の点検、整備や修理は販売店にご依頼下さい。



装置を分解、改造しない。火災や感電の原因となります。



表示された電源電圧で使用する。火災や感電の原因となります。



## 警告



風呂場、雨や雪が降っている屋外、その他水がかかる場所、湿気の多い場所では使用しない。感電の原因となります。



露の付いた状態で使用しない。感電の原因となります。



ケーブルの上に重いものをのせたり、ケーブルを装置の下敷きにしない。ケーブルが傷ついて火災や感電の原因となります。



ケーブルが痛んだら（芯線の露出、断線など）、すぐに使用を止め、販売店に交換を依頼する。火災や感電の原因になります。



ケーブルを無理に引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたりしない。火災や感電の原因になります。



雷が鳴り出したら、装置や接続されたケーブルなどに触れない。感電の原因となります。



## 注意



必ず付属のACアダプタを使用する。他のACアダプタを使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行う。感電の原因となる場合があります。



装置を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。火災の原因となることがあります。



ケーブルを着脱するときは、プラグ部分を持って行う。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



ほこりの多い場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。  
電源プラグや接続部にほこりが付着している場合は取り除いて使用して下さい。



## 注意



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプタ、電源プラグやケーブルを抜き差ししない。感電の原因となる場合があります。

## 使用上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守り下さい。

- 充電には所定のACアダプタをご使用ください。他のACアダプタを使って充電しますと、センスビューに回復できないダメージをあたえ、また保証が無効となることがあります。

また間違って映像入力端子にACアダプタのジャックを差して充電すると故障する場合があります。

- 商品には液晶画面の保護のため、保護フィルムがついておりますので、フィルムをはがしてご使用下さい。フィルムがついたままでは、画像がきれいに映らないことがあります。
- 1カ月間以上お使いにならない場合は、一旦バッテリーをフル充電して、電源スイッチをオフの状態にして保管してください。
- 湿度の高い場所、浴室、ホコリの多い場所などでのご使用はお避け下さい。
- 分解しないで下さい。分解された場合には、保証の対象外となります。
- 廃棄する場合は、ご使用の地域（都道府県又は市町村）にて定められているリサイクル法及び事業所にて定められている産業廃棄物処理法に従った処理を行って下さい。

## セット内容

本商品には、製品本体及び付属品が入っています。  
これらすべてが揃っているかどうか確認して下さい。

- 本体
- 専用保護ケース
- ストラップ
- A Cアダプタ
- 取扱説明書（本書）
- 保証関係書類


## バッテリー充電方法

充電目安時間は、約3時間です。

付属のA Cアダプタをセンスビュー本体に接続し、反対側をご家庭の電源コンセントに接続してください。

充電完了のサインについては、16ページ（4. バッテリー表示）をご参照下さい。

# 1. 操作方法

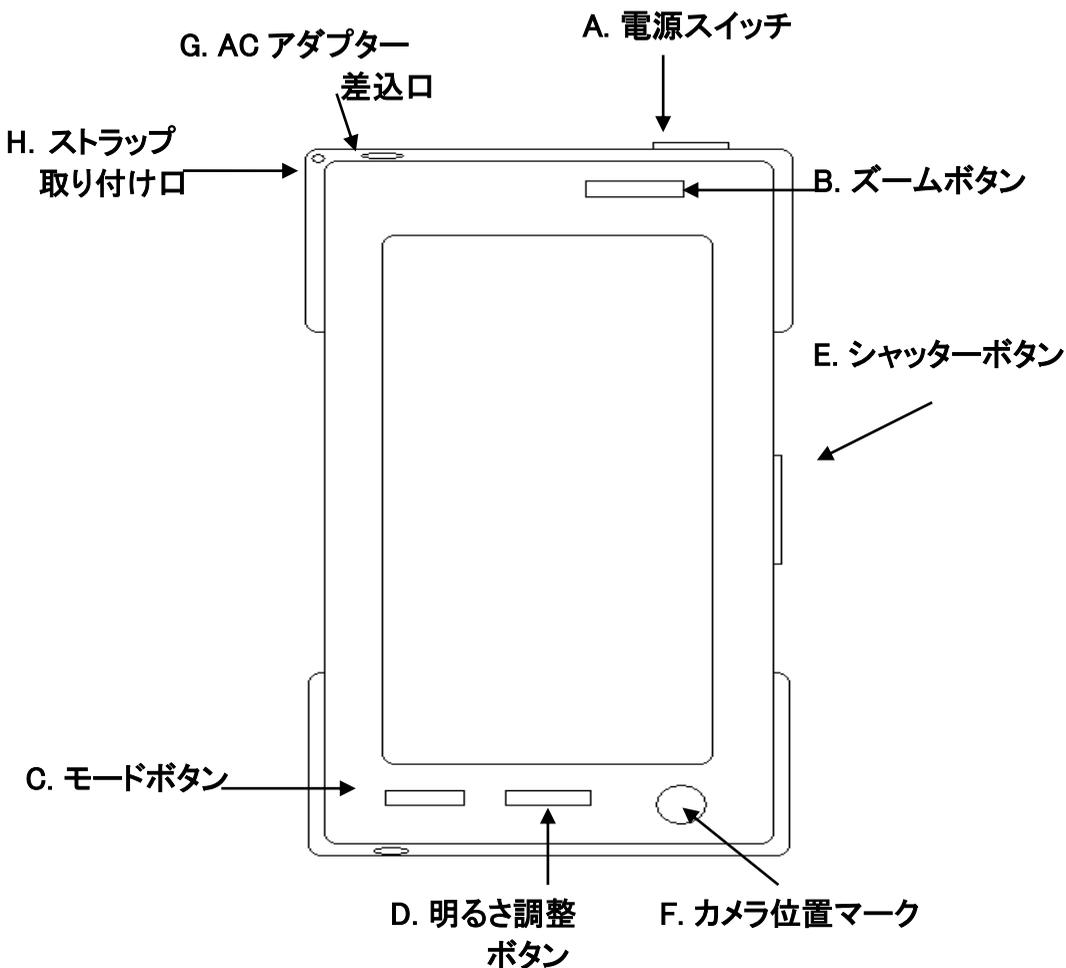

## A. 電源スイッチ

電源スイッチを下にスライドさせると、電源が入り、TIMESのロゴが画面に表示されます。

電源を切って、改めて電源をオンにするときには、必ず1秒以上待ってから電源をオンにしてください。

## B. ズームボタン

ズームボタンは上下に分かれており、上側が拡大ボタン、下側が縮小ボタンになっています。拡大、縮小ともに9段階にわかれており、各段階の倍率は次の通りとなっています。

段階	スタンド使用時	スタンド使用しない時
1	4.7倍	6.7倍
2	6倍	8倍
3	6.8倍	9.5倍
4	8.4倍	11.6倍
5	9.5倍	13倍
6	10.3倍	13.6倍
7	11.9倍	15.8倍
8	13.6倍	19倍
9	15.8倍	22.5倍

## C. モードボタン

ボタンを押すごとに、カラー、白黒、白黒反転、黒黄、青黄、白青の6つのモードに変化します。

## D. 明るさ調整ボタン

段階で明るさを調整することができます。

ボタンを押すごとに明るくなり、最も明るい状態で再度ボタンを押すと、最も暗いレベルに戻ります。

※倍率、モード、明るさは、電源を入れなおすと、電源を切る前の状態で表示されます。

## E. シャッターボタン

画面に映っている映像を静止記録させます。拡大ボタンで画像を拡大、縮小したり、モードボタンでカラーを変えたりできます。再度シャッターボタンを押すと動画に戻ります。

なお、画像の保存は出来ません。

画像を静止させてから、10分間何も操作をしない場合、自動的に電源が切れます。

## F. カメラ位置マーク

カメラがこのマークの下にあることを示しています。読みたいところにこのマークをあてるようにしてください。

## G. ACアダプター差込口

充電の際にACアダプターを差し込む差込口です。

## H. ストラップ取り付け口

ストラップの取り付け口です。

## 2. ビープ音について

各ボタンを押すと、ビープ音が鳴り、ボタンを押したことを教えてくれます。

明るさ調整ボタンと拡大ボタンを同時に押すことで、ビープ音を消すことができます。

再びビープ音が鳴るようにするには、再度明るさ調整ボタンと拡大ボタンを同時に押してください。

## 3. 節電モード

電源を入れたまま、3分間何も動作がない場合、節電モードになります。節電モードになると、LEDは消

灯し、画面は明るさが最も暗いレベルになります。そして、カメラ位置マークが点滅します。

省電力機能を解除するには、何かボタンを押して下さい。

節電モードが作動してから、さらに7分間何も動作がない場合、自動的に電源が切れます。

## 4. バッテリー表示

モードボタンと縮小ズームボタンを同時に押すと、図のようにバッテリーの残量が画面の右上に表示されます。バッテリーの残量は3段階で表示されており、充電が必要になると表示が点滅します。

バッテリー残量の表示を消すには、再度モードボタンと縮小ボタンを同時に押して下さい。



バッテリー残量の表示

ディスプレイの右上に表示されます。

ACアダプタを接続し、バッテリーを充電しながら本体を使用する場合、バッテリーの充電中は残量は赤色で表示されます。バッテリーの充電が8割程度完了すると、残量は緑色で表示されます。（緑色に変わってからさらに1～2時間充電することで、満充電になります。）

ACアダプタを取り外すと、残量は青色で表示されず。

## 5. ストラップ取付方法

ストラップの先端の細い部分を、本体のストラップ取付口（11ページ参照）へ通し、通した輪の中へストラップの太い部分を通し、きっちりと締めて下さい。

## 6. お手入れ方法

センスビューが汚れましたら、合成洗剤を薄く溶かした水で雑巾を湿らせ硬くしぼってから拭取って下さい。液晶画面に影響がありますので、化学薬品、研磨剤などは使用しないで下さい。水に濡らすことは、厳禁です。

液晶画面の指紋の汚れなどには、ディスプレイ専用のクリーンキットをご使用されますと、よりきれいに取れます。

## 7. 仕様

部位	仕様
液晶画面	4.3 インチ WQVGA TFT-LCD (16:10 ワイド)
ズーム	4.7 倍～22.5 倍 スタンド未使用 6.7 倍～22.5 倍 スタンド使用時 4.7 倍～15.8 倍 (光学 4.7 倍・6.7 倍)
明るさ調整	5 段階
カラーモード	カラー、白黒、白黒反 転、黒黄、青黄、白青
専用外部ビデオ入力	
バッテリー内蔵	リチウムポリマーバッテ リ 3 時間充電 3～4 時間連続使用可能
サイズ	縦 83mm 幅 143mm 厚さ 22.5mm (スタンド使用時 25mm)
重さ	221g

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

## 保証の内容、修理サービスについて

製品保証期間：購入日より1年間

※ユーザー登録していただくと保証期間は2年間に延長されます。

※長期保証セットをご購入いただいたお客様は購入日より5年間の保証（無償バッテリー交換1回付）となります。

1. 内蔵のバッテリーについては消耗品です。保証の対象ではありません（5年保証の場合、1回は無償交換）ので、ご注意下さい。バッテリーの交換は、お求めになった販売店にご連絡下さい。
2. 保証期間中での液晶画面の不良画素について、10個以下については保証の対象ではありません。
3. 保証期間中に修理を依頼されるときは、「使用上のご注意」をはじめ、取扱説明書の内容をもう一度ご覧頂き、なお異常のあるときは、必ず装置への電源供給を停止し、装置の電源を切ってから、お求めになった販売店にご連絡ください。アフターサービスについてご不明な点はお求めになった販売店にお問い合わせください。
4. ご連絡いただきたい内容は、ご住所、ご氏名、製品名、ご購入日、故障内容、異常の状況（できるだけ詳しく）などです。
5. 製品保証内容は、商品に同梱されている品質保証書によります。

## お問い合わせについて

本商品やサービスについてご不明な点がございましたら、下記サービス窓口までご連絡願います。

株式会社 タイムズコーポレーション

お客様相談センター

フリーダイヤル:0120-886610

平日 9:00~17:30 (土日祝は休み)

製造元:HIMS (韓国)



輸入販売元：株式会社タイムズコーポレーション  
〒665-0051 兵庫県宝塚市高司1-6-11

TEL:0797-74-2206

FAX:0797-73-8894

<http://www.times.ne.jp>